

# CORK

## MEDICAL

### Apósito adhesivo transparente Cork 1-2-3 de 10" x 12" Número de pieza: CWD-200

#### USO

El apósito adhesivo transparente de Cork Medical debe usarse junto con el sistema de tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) de Nisus solamente. El apósito adhesivo transparente se usa para sellar las heridas conforme a la orden médica.

#### INDICACIONES

El apósito adhesivo transparente se indica para:

- Crear un entorno oclusivo al utilizarlo junto con el sistema de TPN de Cork Medical.
- Se utiliza junto con la almohadilla conectora y de espuma para TPN de Cork Medical.

#### CONTRAINDICACIONES

El apósito adhesivo transparente está contraindicado en los siguientes casos:

- Malignidad en la herida
- Osteomielitis no tratada
- Fístula no entérica y no explorada
- Tejido necrótico que supera el 20 por ciento del lecho de la herida.
- El paciente tiene una sensibilidad conocida al apósito adhesivo transparente
- El apósito adhesivo transparente no se debe colocar directamente en la base de la herida

#### ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- Antes del uso, asegúrese de leer atentamente y entender por completo todas las advertencias, precauciones e indicaciones. De no hacerlo, podrían producirse lesiones graves.
- No vuelva a utilizar, procesar ni esterilizar este producto. Este dispositivo es para un único uso. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden dañar el producto y provocar lesiones, infecciones o la muerte.
- No utilizar si el envase individual está abierto o si el paquete o el producto está dañado. Antes de usar el producto, revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso.
- Al desechar el apósito adhesivo transparente se deben seguir las políticas del establecimiento o las ordenanzas locales que regulan la manipulación de materiales posiblemente infectados o biopeligrosos.

#### INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea atentamente las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** antes del uso.
2. Revise el empaque para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso; asegúrese de que el producto no esté vencido. Si el empaque está dañado o vencido, reemplace toda la unidad.
3. Verifique la orden médica de TPN y asegúrese de que esté completa antes de empezar. Revise la lista de contraindicaciones que se encuentra más arriba. Limpie la herida y la zona que la rodea siguiendo los lineamientos de la institución y la orden médica.
4. Abra el paquete del apósito.
5. Despegue primero la pestaña nro. 1. Presione suavemente el adhesivo expuesto del apósito transparente sobre la piel. (Se recomienda recortar el apósito adhesivo transparente para un mejor control así como para evitar errores). Despegue la pestaña nro. 2 y presione el apósito adhesivo transparente suavemente alrededor de la zona que rodea la

herida. Presione suavemente el centro del apósito adhesivo transparente y continúe presionando hacia afuera desde la zona central. (No comprima el apósito de esponja al aplicar el apósito adhesivo transparente). Asegúrese de formar un sellado hermético antes de despegar la pestaña nro. 3.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el exceso de calor y humedad.



No utilizar si el paquete está dañado.



Para un uso único. No reesterilizar

STERILE R

#### Venta bajo receta

Precaución: la legislación federal de los Estados Unidos limita la venta y el uso de este dispositivo a médicos o a personas con la debida orden médica (o bien de un profesional debidamente autorizado).



Fabricado por:

Cork Medical

8000 Castleway Drive

Indianápolis, IN 46250 EE. UU.