



## **Cargador de batería Nisus**

**Número de pieza: NIS-CHRG-C-16**

### **USO**

La bomba para el tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) de Nisus está diseñada para funcionar con una batería de iones de litio recargable. La bomba también puede funcionar con el cargador de batería que se suministra enchufado.

### **INDICACIONES**

El cargador de baterías Nisus está indicado para:

- El uso con la bomba para TPN de Nisus.

### **CONTRAINDICACIONES**

El cargador de baterías Nisus está contraindicado en los siguientes casos:

- No se debe utilizar con ningún otro dispositivo médico ni personal.

### **ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES**

- Antes del uso, asegúrese de leer atentamente y entender por completo todas las advertencias, precauciones e indicaciones. De no hacerlo, podrían producirse lesiones graves.
- No utilizar si el envase individual está abierto o si el empaque o el producto está dañado. Antes de usar el producto, revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso.
- Utilice únicamente el cargador de baterías proporcionado por Cork Medical.
- Al limpiar los equipos médicos procure siempre atenerse a las políticas de su establecimiento.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Asegúrese de que el cable de alimentación recargable esté firmemente insertado en el puerto de alimentación del dispositivo Nisus.
2. Conecte el extremo opuesto del cable eléctrico de corriente alterna a la pared u otra toma eléctrica adecuada.
3. Retire el cable de carga una vez que el dispositivo Nisus esté completamente cargado.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el exceso de calor y humedad.



**Fabricado para:**

**Cork Medical**

**8000 Castleway Drive**

**Indianapolis, IN 46250 EE. UU.**