

# CORK MEDICAL PRODUCTS

**Recipiente de 250 ml**  
**Número de pieza: CPC-250**

**Recipiente de 500 ml**  
**Número de pieza: CPC-500**

## USO

El sistema del recipiente colector se usa para extraer exudado y residuos de la base de la herida.

## INDICACIONES

Utilice los recipientes junto con el sistema de tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) de Nisus. El recipiente de 250 ml se debe utilizar para heridas exudativas pequeñas, y el recipiente de 500 ml para heridas exudativas grandes.

## CONTRAINDICACIONES

No utilice los recipientes de Nisus en ningún otro dispositivo de TPN.

## ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- Antes del uso, asegúrese de leer atentamente y entender por completo todas las advertencias, precauciones e indicaciones. De no hacerlo, podrían producirse lesiones graves.
- No reutilice ni reprocese este producto. Este dispositivo es para un único uso. La reutilización o el reprocesamiento puede dañar el producto y ocasionar una lesión, infección o la muerte.
- No utilizar si el envase individual está abierto o si está dañado el paquete. Antes de usar el recipiente, revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso.
- Al desechar los recipientes una vez utilizados se deben seguir las políticas del establecimiento o las ordenanzas locales que regulan la manipulación de materiales posiblemente infectados o biopeligrosos.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea atentamente las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** antes del uso.
2. Revise el envase para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso. Si el envase está dañado o vencido, reemplace la unidad.
3. Verifique la orden médica de TPN.
4. Abra el vendaje del recipiente.
5. Pince el tubo del recipiente.
6. Enganche el recipiente a la parte posterior del dispositivo Nisus.
7. Asegúrese de escuchar un 'clic'.
8. Tire suavemente del recipiente para asegurarse de que esté fijo en su lugar.
9. Conecte el tubo del recipiente al tubo de la almohadilla conectora.
10. Asegúrese de que las pinzas de los tubos del recipiente y de la almohadilla conectora estén abiertas.
11. Encienda el dispositivo Nisus.
12. Verifique que exista una hermeticidad total: el apósito debe tener una apariencia arrugada.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el exceso de calor y humedad.



Este producto no es estéril.



Para un único uso



No utilizar si el paquete está dañado.

## Venta bajo receta

Precaución: la legislación federal de los Estados Unidos limita la venta y el uso de este dispositivo a médicos o a personas con la debida orden médica (o bien de un profesional debidamente autorizado).



Fabricado para:  
Cork Medical Products  
8000 Castleway Drive  
Indianápolis, IN 46250 EE. UU.