

CORK MEDICAL PRODUCTS

Almohadilla conectora

Número de pieza: CSP-100-ES-C

USO

La almohadilla conectora de Cork Medical se usa para transmitir presión negativa del dispositivo de bomba Nisus a la base de la herida.

INDICACIONES

La unidad de almohadilla conectora Cork se indica para:

- Usar con el dispositivo de bomba Nisus para el tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) solamente.
- Usar con el kit de apósitos Nisus para TPN en la base de la herida.

CONTRAINDICACIONES

La unidad de almohadilla conectora Cork está contraindicada en los siguientes casos:

- Malignidad en la herida
- Osteomielitis no tratada
- Fístula no entérica y no explorada
- Tejido necrótico que supera el 20 por ciento del lecho de la herida.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- Antes del uso, asegúrese de leer atentamente y entender por completo todas las advertencias, precauciones e indicaciones. De no hacerlo, podrían producirse lesiones graves.
- No vuelva a utilizar, procesar ni esterilizar este producto. Este dispositivo es para un único uso. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden dañar el producto y provocar lesiones, infecciones o la muerte.
- No utilizar si el envase individual está abierto o si el empaque o la almohadilla conectora están dañados. Antes de usar el producto, revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso.
- Al desechar la almohadilla conectora usada se deben seguir las políticas del establecimiento o las ordenanzas locales que regulan la manipulación de materiales posiblemente infectados o biopeligrosos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea atentamente las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** antes del uso.
2. Revise el empaque para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso. Asegúrese de que el producto no esté vencido. Si el empaque está dañado, reemplace toda la unidad.
3. Verifique la orden médica de TPN y asegúrese de que esté completa antes de empezar. Revise la lista de contraindicaciones que se encuentra más arriba.
4. Abra la almohadilla conectora.
5. El apósito de TPN está en posición.
6. Levante delicadamente el apósito adhesivo transparente con su pulgar e índice, y corte un orificio redondo de 2 cm en la parte superior del apósito. (no haga un corte lineal, ya que dicho corte se volverá a cerrar cuando el TPN esté en funcionamiento).
7. Asegúrese de alinear correctamente la abertura de la almohadilla conectora con el orificio recortado del apósito adhesivo transparente. Luego de alinear los orificios correctamente, despegue la película inferior y fije la almohadilla conectora al apósito. Cuando haya terminado,

despegue la película superior y las pestañas azules de los costados y retírelas. Dé suaves golpecitos alrededor de la almohadilla conectora para asegurarse de que todo esté firmemente en posición.

8. Conecte el tubo al tubo del recipiente mediante el método Luer Lock y comience el TPN según la orden del médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el exceso de calor y humedad.



No utilizar si el empaque está dañado.



Para un uso único. No reesterilizar

STERILE STERILIZED WITH
ETHYLENE OXIDE

Venta bajo receta

Precaución: la legislación federal de los Estados Unidos limita la venta y el uso de este dispositivo a médicos o a personas con la debida orden médica (o bien de un profesional debidamente autorizado).



Fabricado por:
Cork Medical Products
8000 Castleway Drive
Indianápolis, IN 46250 EE. UU.