

CORK MEDICAL PRODUCTS

Espuma mediana

Número de pieza: CWF-100-ES-B

Espuma grande

Número de pieza: CWF-200-ES-B

USO

La espuma Cork Medical debe usarse junto con el sistema de tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) de Nisus solamente. La espuma se usa para cubrir heridas conforme a la orden médica.

INDICACIONES

La espuma se indica para:

- Lesiones de espesor total
- Injertos de piel
- Quemaduras de espesor parcial
- Colgajos de piel
- Manejo de la línea incisional

CONTRAINDICACIONES

La espuma está contraindicada en los siguientes casos:

- Malignidad en la herida
- Osteomielitis no tratada
- Fístula no entérica y no explorada
- Tejido necrótico que supera el 20 por ciento del lecho de la herida.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- Antes del uso, asegúrese de leer atentamente y entender por completo todas las advertencias, precauciones e indicaciones. De no hacerlo, podrían producirse lesiones graves.
- No vuelva a utilizar, procesar ni esterilizar este producto. Este dispositivo es para un único uso. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden dañar el producto y provocar lesiones, infecciones o la muerte.
- No utilizar si el envase individual está abierto o si está dañado el paquete o la espuma. Antes de usar el producto, revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso.
- Al desechar el producto una vez utilizado se deben seguir las políticas del establecimiento o las ordenanzas locales que regulan la manipulación de materiales posiblemente infectados o biopeligrosos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea atentamente las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** antes del uso.
2. Revise el empaque para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso; asegúrese de que el producto no esté vencido. Si el empaque está dañado o vencido, reemplace toda la unidad.
3. Verifique la orden médica de TPN y asegúrese de que esté completa antes de empezar. Revise la lista de contraindicaciones que se encuentra más arriba. Limpie la herida y la zona que la rodea siguiendo los lineamientos de la institución y la orden médica.
4. Abra el paquete del apósito.
5. Recorte la espuma negra dándole la forma de la herida y asegúrese de que la herida quede completamente cubierta por la espuma. (Recorte la espuma lejos de la herida siempre, para que no caigan restos no deseados en el lecho

de la herida). Asegúrese de que ninguna parte de la espuma esté en contacto con la zona que rodea la herida.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el exceso de calor y humedad.



No utilizar si el paquete está dañado.



Para un uso único. No reesterilizar

STERILE EO STERILIZED WITH ETHYLENE OXIDE

Venta bajo receta

Precaución: la legislación federal de los Estados Unidos limita la venta y el uso de este dispositivo a médicos o a personas con la debida orden médica (o bien de un profesional debidamente autorizado).



Fabricado por:
Cork Medical Products
8000 Castleway Drive
Indianápolis, IN 46250 EE. UU.