

CORK MEDICAL PRODUCTS

Tubo alargador de 24"

Número de pieza: CSP-100-ES-EXT

USO

El Tubo alargador de 24" de Cork Medical se usa para prolongar el tubo de la almohadilla conectora y ayuda a aumentar la movilidad de los pacientes con una herida ubicada en las partes distales del cuerpo.

INDICACIONES

El Tubo alargador de 24" de Cork Medical se indica para:

- Heridas únicas cuando el paciente necesita un tubo más largo para aumentar la movilidad.

CONTRAINDICACIONES

El Tubo alargador de 24" de Cork Medical está contraindicado en los siguientes casos:

- No utilice el tubo alargador con un conector en Y.
- El aumento de la longitud del tubo presenta un peligro de caídas.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- Antes del uso, asegúrese de leer atentamente y entender por completo todas las advertencias, precauciones e indicaciones. De no hacerlo, podrían producirse lesiones graves.
- No reutilice ni reprocese este tubo. Este dispositivo es para un único uso. La reutilización o el reprocesamiento puede dañar el tubo y ocasionar una lesión, infección o la muerte.
- Considere el tubo alargador como una prolongación del tubo de la almohadilla conectora; el tubo se debe cambiar con cada cambio de apósito.
- No utilizar si el envase individual está abierto o si el paquete o el tubo está dañado. Antes de usar el tubo, revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso.
- Al desechar el producto una vez utilizado se deben seguir las políticas del establecimiento o las ordenanzas locales que regulan la manipulación de materiales posiblemente infectados o biopeligrosos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea atentamente las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** antes del uso.
2. Revise el empaque para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso. Si el empaque está dañado o vencido, reemplace toda la unidad del tubo.
3. Verifique la orden médica del tratamiento de heridas con presión negativa (TPN).
4. Abra el paquete del apósito.
5. Pince el tubo de la almohadilla conectora.
6. Pince el tubo del recipiente.
7. Conecte el tubo alargador entre el tubo del recipiente y el tubo de la almohadilla conectora.
8. Encienda el Nisus.
9. Despince el tubo del recipiente.
10. Despince el tubo de la almohadilla conectora.
11. Verifique que exista una hermeticidad total: el apósito debe tener una apariencia arrugada.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el exceso de calor y humedad.



Este producto no es estéril.



Para un único uso



No utilizar si el paquete está dañado.

Venta bajo receta

Precaución: la legislación federal de los Estados Unidos limita la venta y el uso de este dispositivo a médicos o a personas con la debida orden médica (o bien de un profesional debidamente autorizado).



Fabricado por:
Cork Medical Products
8000 Castleway Drive
Indianápolis, IN 46250 EE. UU.