

# CORK MEDICAL PRODUCTS

## Kit de vendaje pequeño para el tratamiento de heridas por presión negativa (TPN)

Número de pieza: WDK-250

## Kit de vendaje mediano para el tratamiento de heridas por presión negativa (TPN)

Número de pieza: WDK-300

## Kit de vendaje grande para el tratamiento de heridas por presión negativa (TPN)

Número de pieza: WDK-400

### USO

El kit de vendaje para el tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) de Cork Medical está destinado a ser utilizado conjuntamente con la Bomba de TPN de Nisus con el objetivo de suministrar terapia de presión negativa a la herida.

### INDICACIONES

Cuando se usa conjuntamente con un sistema de bomba de TPN, el kit de vendaje para TPN de Cork Medical Products se indica en pacientes a quienes un dispositivo de succión beneficiaría particularmente, ya que el dispositivo puede estimular la curación de la herida al retirar el exceso de exudado, material infeccioso y restos de tejido.

### CONTRAINDICACIONES

El tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) está contraindicado en pacientes con:

- Malignidad en la herida
- Osteomielitis no tratada
- Fístula no entérica y no explorada
- Tejido necrótico con presencia de escara (NOTA: Tras el desbridamiento del tejido necrótico y la total remoción de la escara, se puede utilizar TPN).

### ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- Antes del uso, asegúrese de leer atentamente y entender por completo todas las advertencias, precauciones e indicaciones. De no hacerlo, podrían producirse lesiones graves.
- No vuelva a utilizar, procesar ni esterilizar este producto. Este dispositivo es para un único uso. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden dañar el producto y provocar lesiones, infecciones o la muerte.
- No utilizar si el envase individual está abierto o si está dañado el paquete o la espuma. Antes de usar el producto, revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso.
- ADVERTENCIA: No coloque el vendaje en contacto directo con vasos sanguíneos expuestos, lugares de anastomosis, órganos o nervios.
- Al desechar los kits de vendaje se deben seguir las políticas del establecimiento o las ordenanzas locales que regulan la manipulación de materiales posiblemente infectados o biopeligrosos.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea atentamente las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** antes del uso.
2. Revise el empaque para asegurarse de que no esté dañado ni defectuoso; asegúrese de que el producto no esté vencido. Si el empaque está dañado o vencido, reemplace toda la unidad.

3. Verifique la orden médica de TPN y asegúrese de que esté completa antes de empezar. Revise la lista de contraindicaciones que se encuentra más arriba. Limpie la herida y la zona que la rodea siguiendo los lineamientos de la institución y la orden médica.
4. Abra el paquete de vendaje.
5. Limpie la herida y la zona que la rodea siguiendo los lineamientos de la institución y la orden médica. Deje que se sequen.
6. Use el apósito transparente para crear una ventana en la periferia de la herida. Esto debe extenderse 1 a 2 pulgadas desde la herida.
7. Recorte la espuma negra dándole la forma de la herida y asegúrese de que la herida quede completamente cubierta por la espuma. (Recorte la espuma lejos de la herida siempre, para que no caigan restos no deseados en el lecho de la herida). Asegúrese de que ninguna parte de la espuma esté en contacto con la zona que rodea la herida.
8. Si es necesario, recorte el apósito adhesivo transparente al tamaño adecuado cuando se le indique antes de retirar la película posterior. El apósito solo debe cortarse en la dirección que indica la línea de puntos del apósito transparente. Retire la película posterior con la etiqueta "1". Para esto, tome la pestaña plegada del lado izquierdo y despegue la parte posterior. Al colocar el apósito adhesivo transparente sobre la herida, sujete simultáneamente el lado izquierdo y derecho del apósito.
9. Una vez en posición, retire las pestañas de cada lado con la etiqueta "2" tomando la pestaña plegada y despegando la parte posterior. Asegúrese de que el apósito adhesivo transparente esté completamente sellado. Retire la cubierta superior con la etiqueta "3" despegando la pestaña desde cualquiera de los lados del apósito. Retire las pestañas de papel con la etiqueta "Cork Medical Products" de ambos lados del apósito.
10. Utilizando sus dedos pulgar e índice, levante suavemente el apósito en la parte central de la espuma negra y recorte un orificio redondo de 2 cm en la parte superior del apósito. (no haga un corte lineal, ya que dicho corte se volverá a cerrar cuando el TPN esté en funcionamiento).
11. Para colocar el puerto de succión, retire el papel posterior con la etiqueta "remove first" (retirar primero). Sostenga ambos extremos del contorno transparente del puerto de succión por las pestañas plegadas y centre el parche de ventosa sobre el orificio recortado en el apósito. Adhiera el contorno en la posición correcta.
12. Una vez en posición, retire las pestañas de papel que se encuentran en cada lado del contorno. Asegúrese de que el contorno transparente esté completamente sellado. Retire la cubierta superior del contorno transparente. Para esto, despegue el papel utilizando los cortes ondulados cercanos al centro.
13. Conecte el tubo al tubo del recipiente mediante el método Luer Lock y comience el TPN según la orden del médico. Consulte el Manual del usuario de la bomba de TPN de Cork para aprender a manejar el dispositivo de bombeo.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el exceso de calor y humedad.



No utilizar si el paquete está dañado.




Para un uso único. No reesterilizar



## Venta bajo receta

Precaución: la legislación federal de los Estados Unidos limita la venta y el uso de este dispositivo a médicos, o por orden de éstos (o bien de un profesional debidamente autorizado).

 Fabricado por:  
Cork Medical Products  
8000 Castleway Drive  
Indianápolis, IN 46250 EE. UU.